

尿中ビタミンC 半定量尿テストテープ






VitaChek-C

高濃度ビタミンC 点滴療法で有名なカンザス州ウィチタ市にある人間機能改善センター開発された尿中ビタミンC を半定量するテストテープです。

尿中に排泄されるビタミンC を5段階 (0, 10, 20, 50, 100mg/dl) に半定量することで日常のビタミンC 摂取量や消費量を推定することができます。

(米国製・テストテープ50本入り)

** COLOR CHART **

0	10	20	50	100 (mg/dl)
				
18	20	22	18	22 (%) ※

〈使用法ならびに特性について〉

1. 健康人の尿中のビタミンC を測定するのに適しています。尿に漬けてすぐに判定し、食事のアドバイスやサプリメント摂取をお勧めする時の参考になります。
2. 尿中のビタミンC 濃度が低い場合は食事による摂取と同時にサプリメントでの摂取を進めています。これはビタミンC が不足している食生活では他のビタミンやミネラルも不足していると考えられるからです。
3. 炎症疾患や疲労度の高い人は尿中ビタミンC がほとんどゼロのケースが多いです。
4. 高濃度ビタミンC 点滴療法をしている場合は血中濃度が高く、テストテープでは常に強陽性になります。残念ながら、テストテープの所見から高濃度ビタミンC 点滴療法中の血中濃度の推測はできません。
5. スピックサロン・メディカルクリニックではすべての患者さんのスクリーニング検査に使用しています。 ※続刊はスピックサロン・メディカルクリニックによる